




Pobieranie wymazu

Szczegółowe instrukcje

Jak uzyskać pomoc?

W razie pytań lub trudności z korzystaniem z zestawu testowego, należy skontaktować się z pracownikiem placówki.

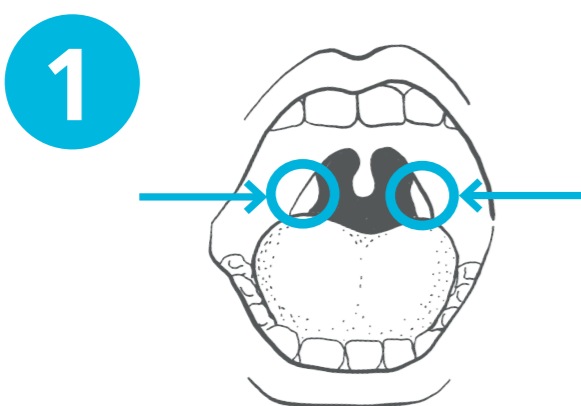

1

Zdejmij maseczkę.

Zajrzyj do jamy ustnej, gdzie migdałki są widoczne w tylnej części gardła.

Pomocne może być lusterko.

Wymaz należy pobrać w miejscu, w którym znajdują się migdałki lub w którym się znajdowały (jeżeli zostały usunięte).




2

Delikatnie wydmuchaj nos w chusteczkę higieniczną.

Wyrzuć zużytą chusteczkę do kosza na odpady medyczne.


Ma to na celu usunięcie nadmiaru śluzu.

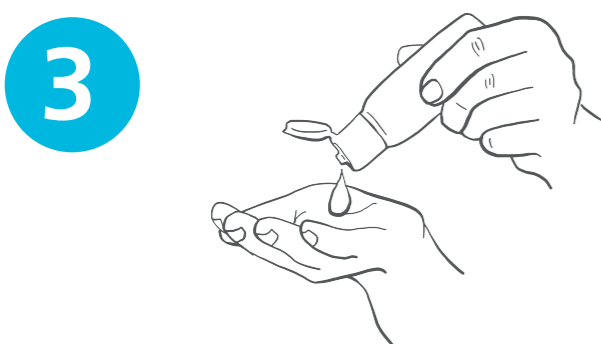

3

Oczyść dłonie środkiem do odkażania rąk.

Zapobiega to skażeniu zestawu testowego.

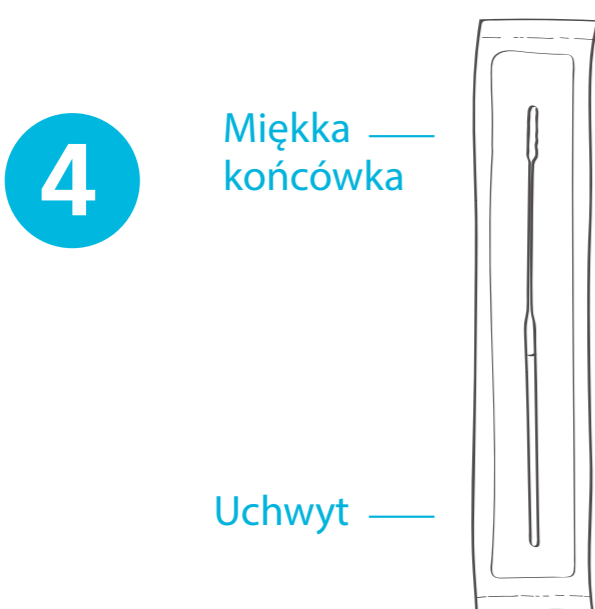


4

Miękka —
końcówka

Uchwyt —

Sprawdź, czy w pobliżu znajduje się zapieczętowane opakowanie z patyczkiem wymazowym.

Zwróć uwagę na miękką końcówkę patyczka wymazowego wykonaną z tkaniny.

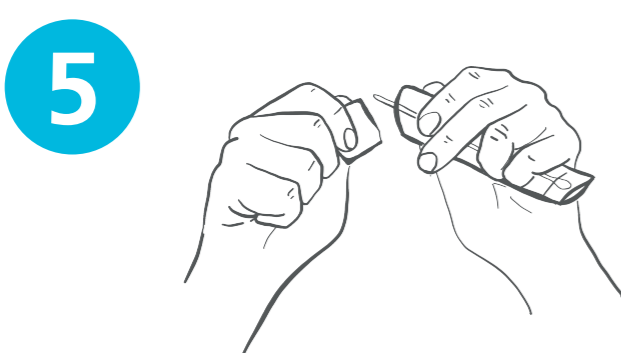

5

Otwórz opakowanie i ostrożnie wyjmij patyczek wymazowy.


Jeden patyczek używany jest do pobrania wymazu z migdałków i z nosa.

Uwaga! Miękką końcówką patyczka wymazowego nie wolno dotykać języka, zębów, policzków, dziąseł ani żadnych innych powierzchni.

Jeżeli dojdzie do kontaktu z tymi powierzchniami, wymaz będzie nieważny i konieczne będzie wykonanie nowego wymazu. W takim przypadku należy poprosić pracownika placówki o pomoc.

Uwaga! Pobieranie wymazu może być nieprzyjemne. Nie należy wkładać patyczka wymazowego głębiej, jeżeli wyczuwalny jest silny opór lub ból.

Jeżeli na wymazie znajduje się krew lub wymiociny, należy powiadomić pracownika placówki.

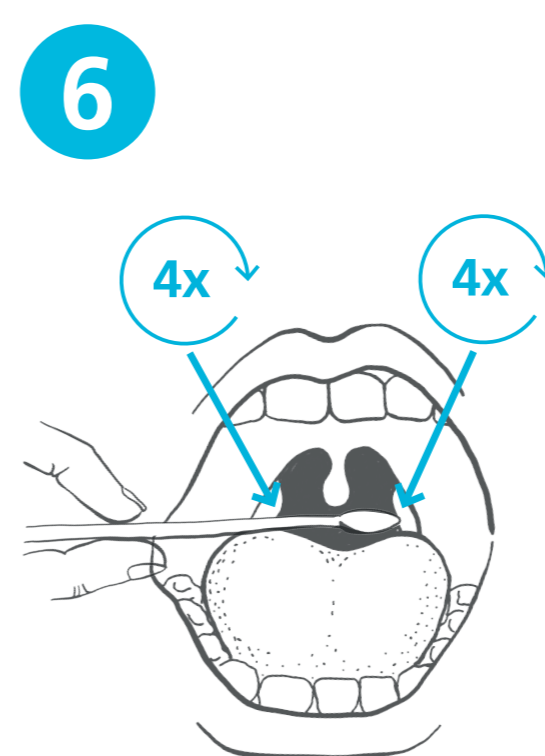

6

Trzymając patyczek dwoma palcami, otwórz szeroko usta i pocieraj miękką końcówką patyczka powierzchnię obu migdałków (lub miejsce, w którym się znajdowały). Należy pocierać dość mocno 4 razy z każdej strony (pomocne może być lusterko).

Ostrożnie wyjmij patyczek z gardła.



7

Ten sam patyczek włóż ostrożnie do każdego nozdrza do momentu wyczucia lekkiego oporu (około 2,5 cm ku górze nosa).

Obracaj patyczkiem, pocierając dość mocno wewnątrz nozdrza, wykonując 10 pełnych obrotów, po czym powoli wyjmij go.

Uwaga! Po pobraniu wymazu trzymaj patyczek w dłoni skierowany ku górze i nie kładź go na żadnej powierzchni, a następnie powiadom jednego z techników prowadzących testy.

Patyczka nie wolno kłaść ani dotykać nim żadnej powierzchni.

Założ ponownie maseczkę na twarz.

Dalsze polecenia zostaną wydane przez pracowników placówki.

Po wykonaniu wymazu użyj środka do odkażania rąk.