

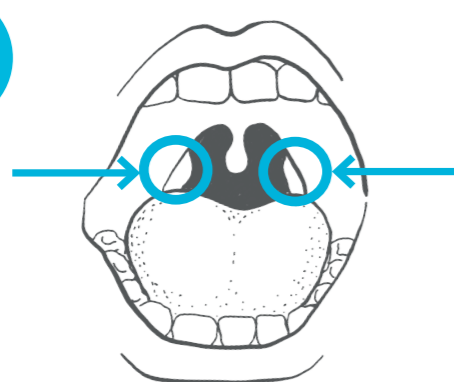


Prelevarea de mostre

Un ghid pas cu pas

Aveți nevoie de ajutor?

Dacă aveți întrebări sau probleme cu acest kit de testare, vă rugăm să informați un membru al personalului.

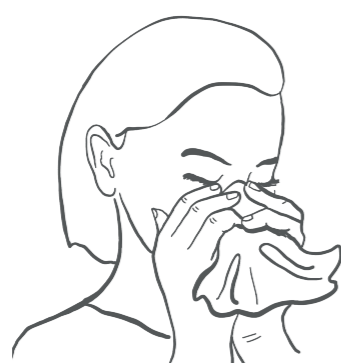
1

Îndepărtați masca de pe față.

Uitați-vă în gura dumneavoastră și localizați amigdalele în partea din spate a gâtului.

Puteți folosi oglinda pentru ajutor.

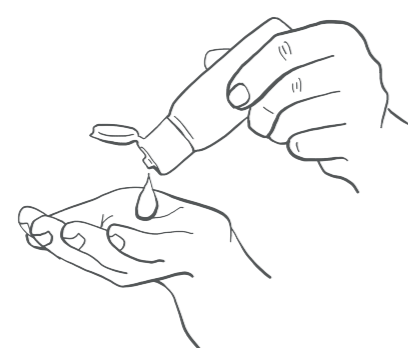
Amigdalele dumneavoastră sau locul unde ar fi fost (dacă acestea au fost extirpate) este locul de unde veți preleva mostra.

2

Suflați nasul ușor într-un șervețel

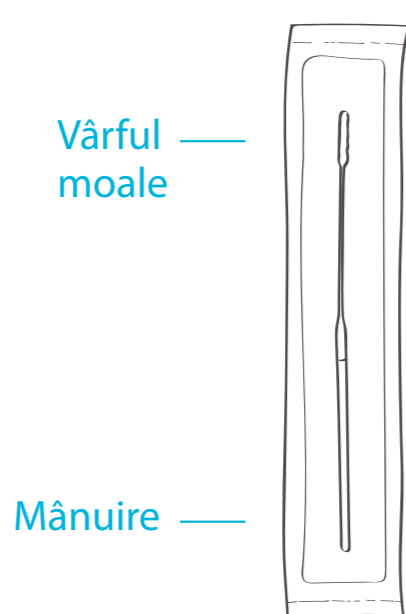
Aruncați șervețelul folosit în coșul de gunoi pentru deșeuri medicale furnizat.

Aceasta este pentru a elimina excesul de mucus.

3

Folosiți dispozitivul de dezinfectare a mâinilor pentru a vă curăța mâinile.

Aceasta este pentru a nu contamina kitul de testare.

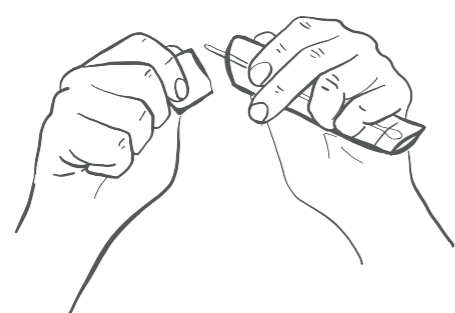
4

Vârful moale

Mânuire

Verificați dacă există o mostră într-un pachet sigilat în fața dumneavoastră.

Identificați vârful moale de material al mostrei.

5

Deschideți pachetul și scoateți mostra ușor

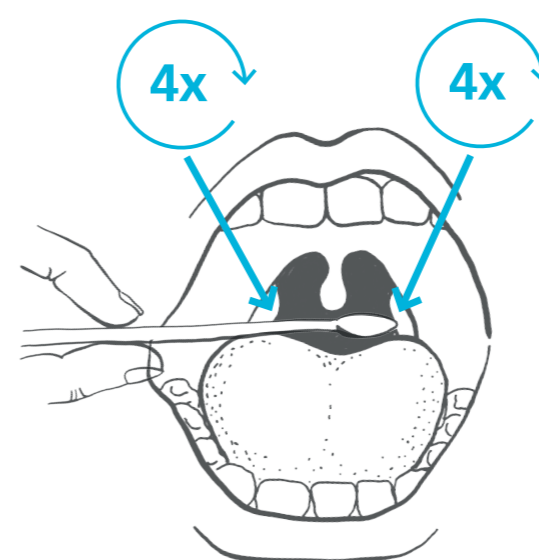
Aceasta va fi utilizată atât pentru amigdale cât și pentru nas.

Important: Nu atingeți limba, dinții, obrații, gingiile sau orice alte suprafețe cu vârful de material al mostrei.

Mostra nu este validă dacă atinge aceste părți și va trebui să obțineți o nouă mostră. Dacă se întâmplă acest lucru, cereți unui membru al personalului să solicite asistență.

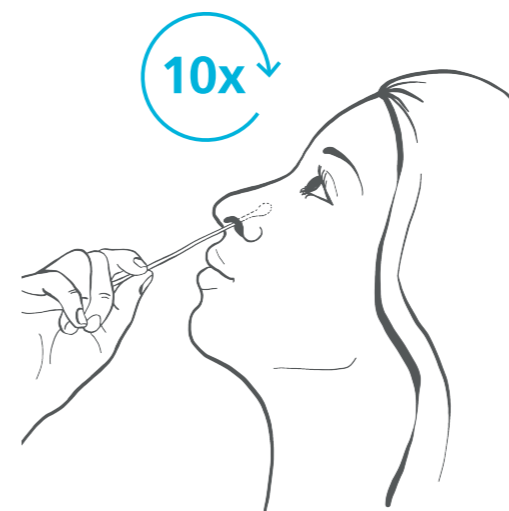
Important: Prelevarea mostrei poate fi inconfortabilă. Nu introduceți bețișorul mai adânc dacă simțiți rezistență puternică sau durere.

Dacă sângerați sau vomitați pe mostră, vă rugăm să informați un membru al personalului.

6

Ținând bețișorul între degete, deschideți gura și tamponați vârful de material al mostrei peste ambele amigdale (sau în locul unde ar fi fost). Faceți acest lucru cu **atingere fermă, de 4 ori pe fiecare parte** (utilizați o oglindă pentru a vă ajuta să faceți acest lucru).

Îndepărtați cu atenție bețișorul cu mostra din partea din spate a gâtului.

7

Puneți aceeași mostră într-o nară până când simțiți o ușoară rezistență (aproximativ 2,5 cm sau 1 inch în sus pe nas).

Rulați bețișorul ferm în jurul interiorului nării, făcând 10 cercuri complete și îndepărtați-l încet.

Important: După colectarea mostrei, țineți bețișorul în poziție verticală în mână, nu îl lăsați jos și informați pe unul dintre asistenții de testare.

Aveți grijă să nu atingeți nici o suprafață cu mostra.

Puneți-vă masca înapoi.

Urmați instrucțiunile unui membru al personalului cu privire la ce să faceți în continuare.

Folosiți gel dezinfectant pentru mâini după ce ați predat mostra.